

# Sani-Cloth® Bleach

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE  
TOALLITAS GERMICIDAS DESECHABLES

Use on hard, nonporous environmental surfaces.  
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



## GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO



**1. Always dispense wipe through lid. Wear gloves when dispensing and using this product. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the canister lid. Pull through about one inch. Replace lid.**

Siempre dispense limpiante por la tapa. Use guantes para suministrar y utilizar este producto. Quite la tapa, retire el sello interno y deséchelo. Localice el centro del rolo de toallitas; retuerza el vertice de la toallita para formar una punta y hagala pasar por el orificio de la tapa del bote. Jale aproximadamente una pulgada hacia afuera. Vuelva a colocar la tapa.



**2. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.**

Cubra la mitad de la abertura con una mano. Retire la toallita de un tirón, en dirección contraria a la cara y a los ojos. Cuando no este usando las toallitas, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de la humedad.



**3a. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.**

Si esta presente, retire las cargas pesadas del suelo antes de la desinfección.



**3b. Unfold a clean wipe and thoroughly treat surface.**

Despliegan un trapo limpio y completamente trate la superficie.



**4. Allow surface to remain treated for four (4) minutes. Let air dry.**

Permitir a la superficie tratada permanecer durante cuatro (4) minutos. Dejar secar al aire.



**5. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.**

No vuelva a utilizar la toallita. Bote a la basura la toallita usada. No la tire por el inodoro.

